




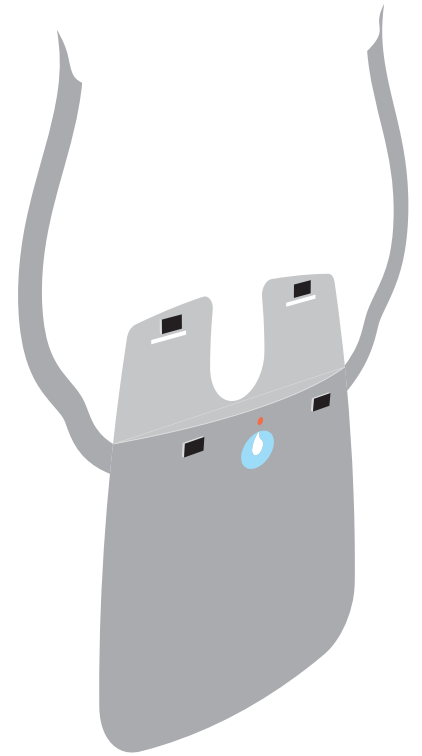


DREMED DREENIERITEPUSSIN SUOJA

SUOJA ETUPUOLELTA

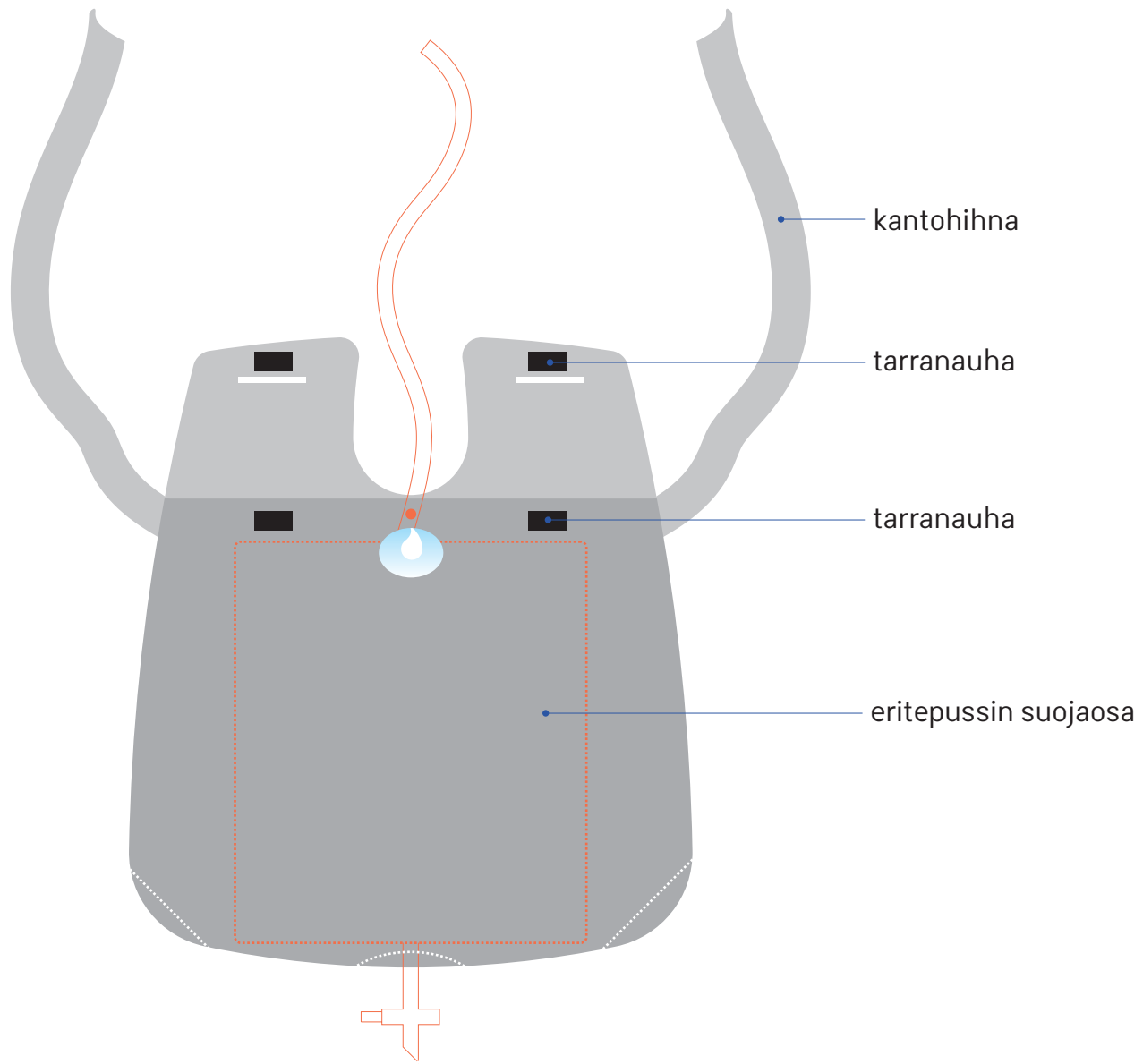

SUOJA TAKAPUOLELTA

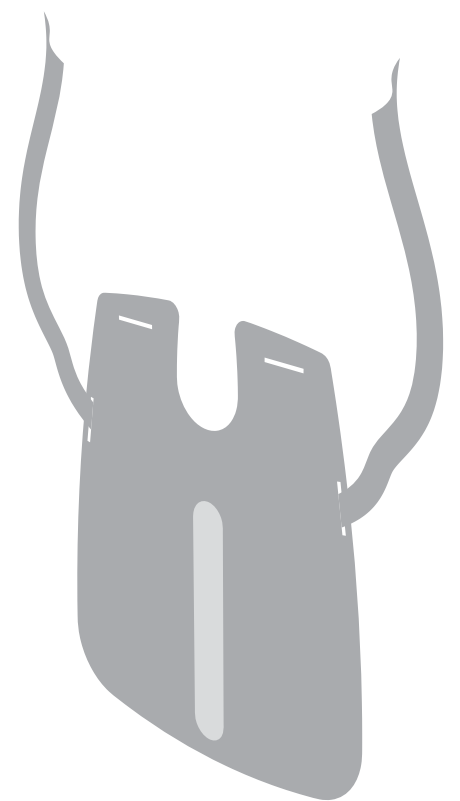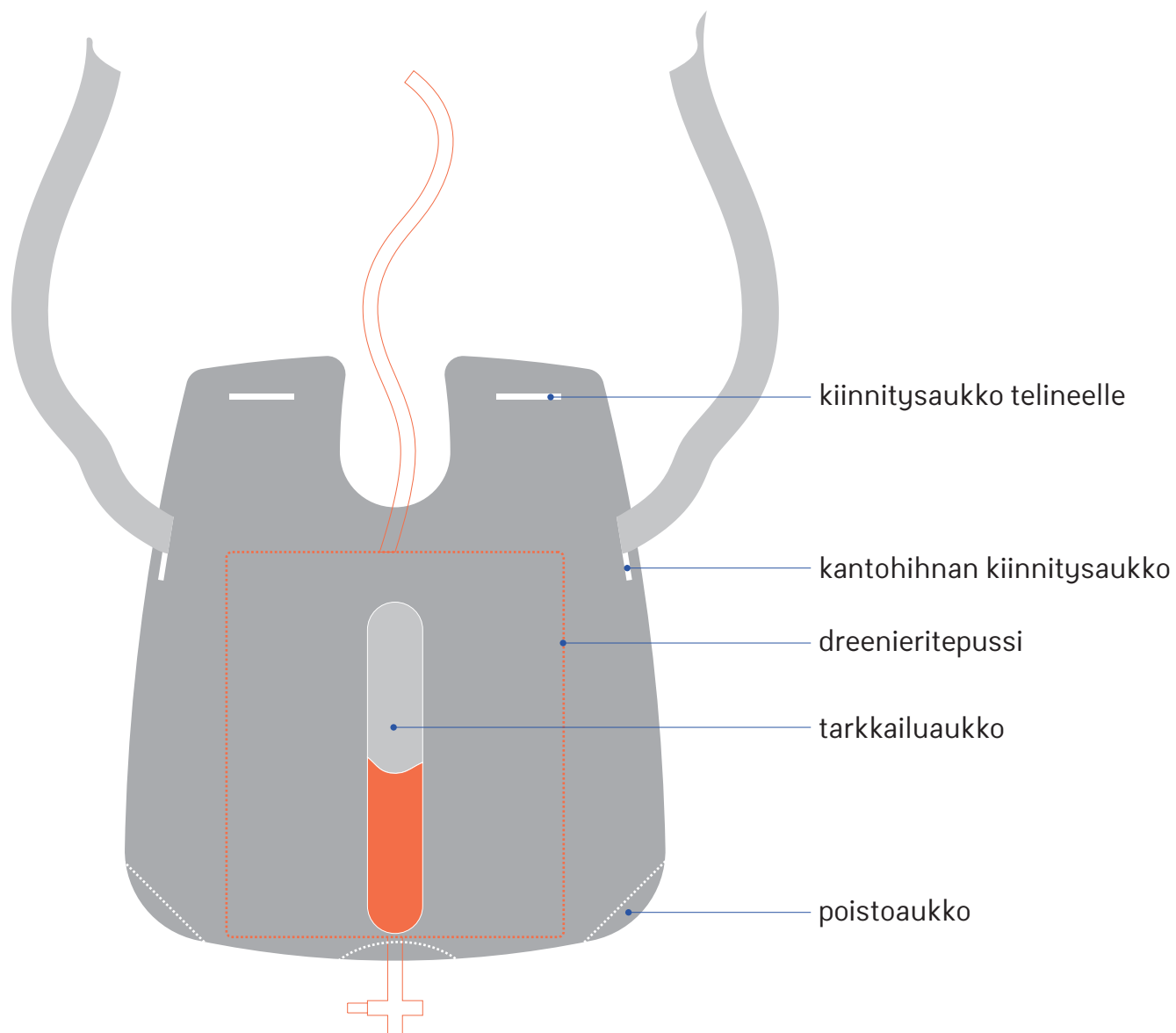




DREMED DREENIERITEPUSSIN SUOJA


KÄYTTÖ OLKALAUKUN TAVOIN

Suojaa voi kantaa laukun tavoin olalla. Olalla kannettaessa tarkkailuaukko jätetään vartaloa vasten jottei dreenieritepussi näy ulospäin. Tarvittaessa nesteen määrän voi tarkistaa avaamatta suojan tarrakiinnityksiä.

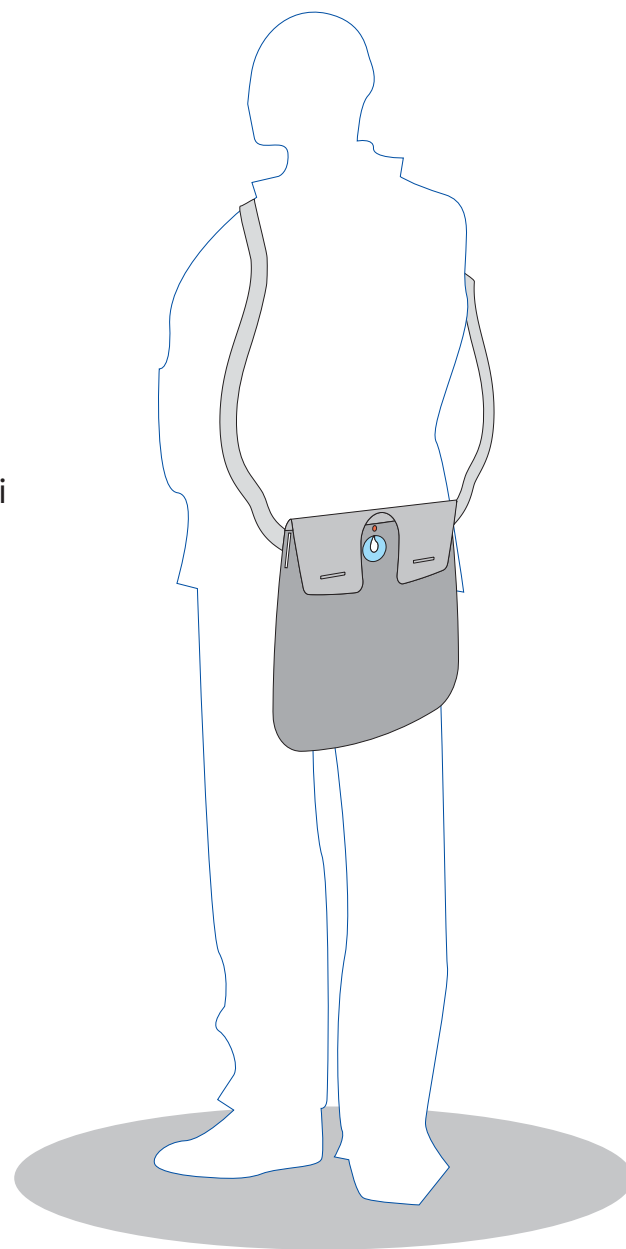

SUOJA TAKAPUOLELTA

Suojaa voi kantaa myös vyöllä. Vyöllä kannettaessa tarkkailuaukko jätetään vartaloa vasten jottei dreenieritepussi näy ulospäin. Tarvittaessa nesteen määrän voi tarkistaa avaamatta suojan tarrakiinnityksiä.

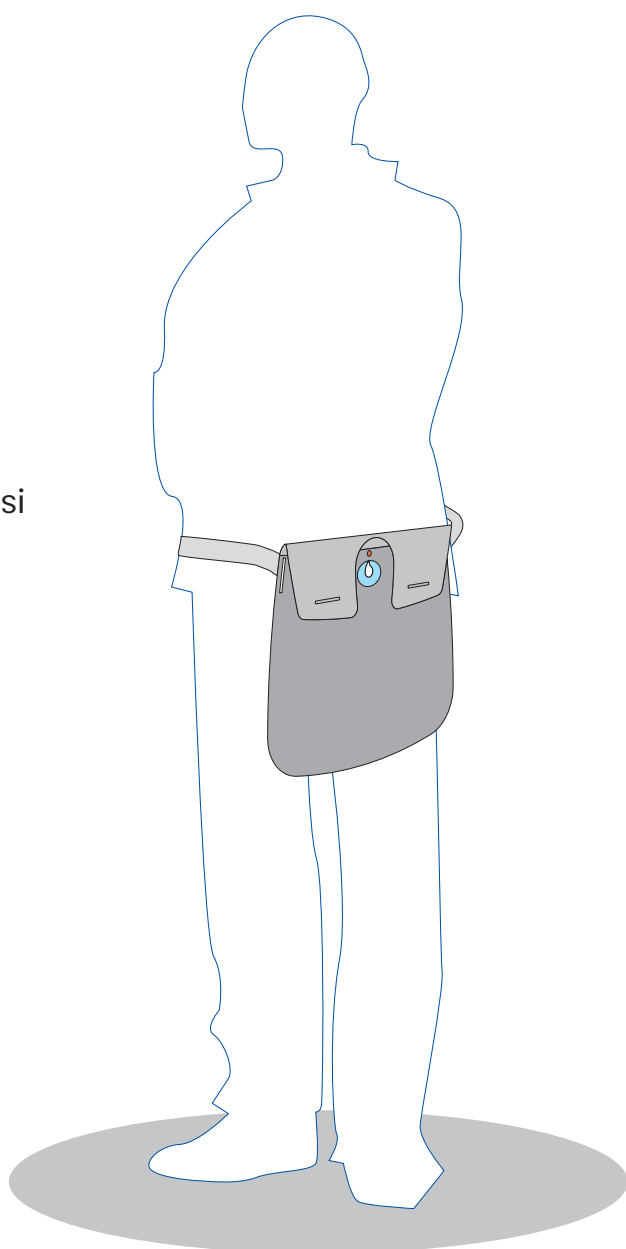




DREMED DREENIERITEPUSSIN SUOJA

KIINNITYS TELINEESEEN

Suoja kiinnitetään telineeseen takapuoli näkyvälle puolelle, jotta nesteen määrän tarkkailu onnistuu.

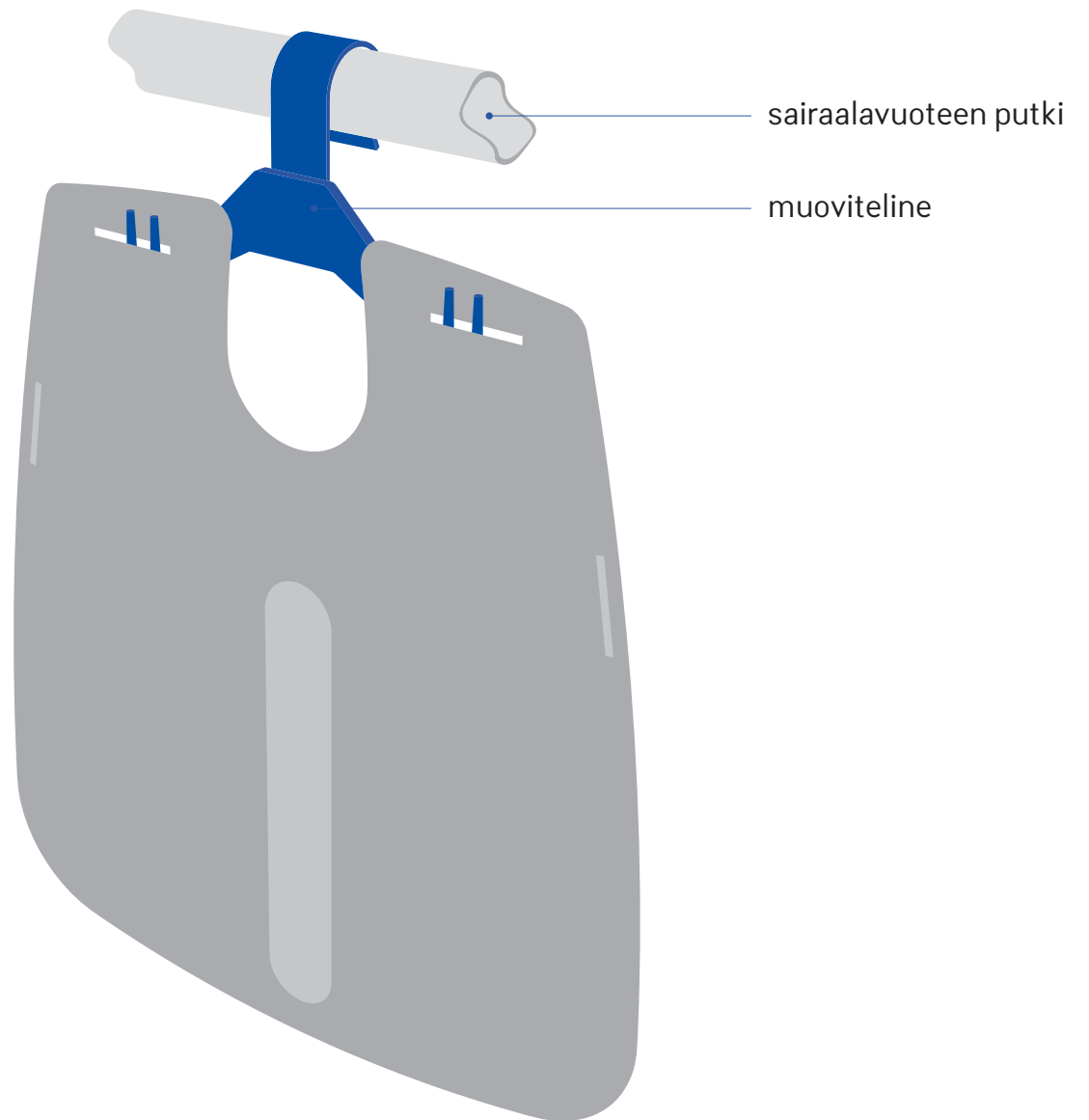

KIINNITYS SAIRAALAVUOTEEN PUTKEEN

Suoja kiinnitetään sairaalavuoteen putken ympäri tarranauhakiinnityksillä takapuoli näkyvälle puolelle, jotta nesteen määrän tarkkailu onnistuu.

